



Versatilidad y seguridad aprobada

Option™ ELITE
Retrievable Vena Cava Filter

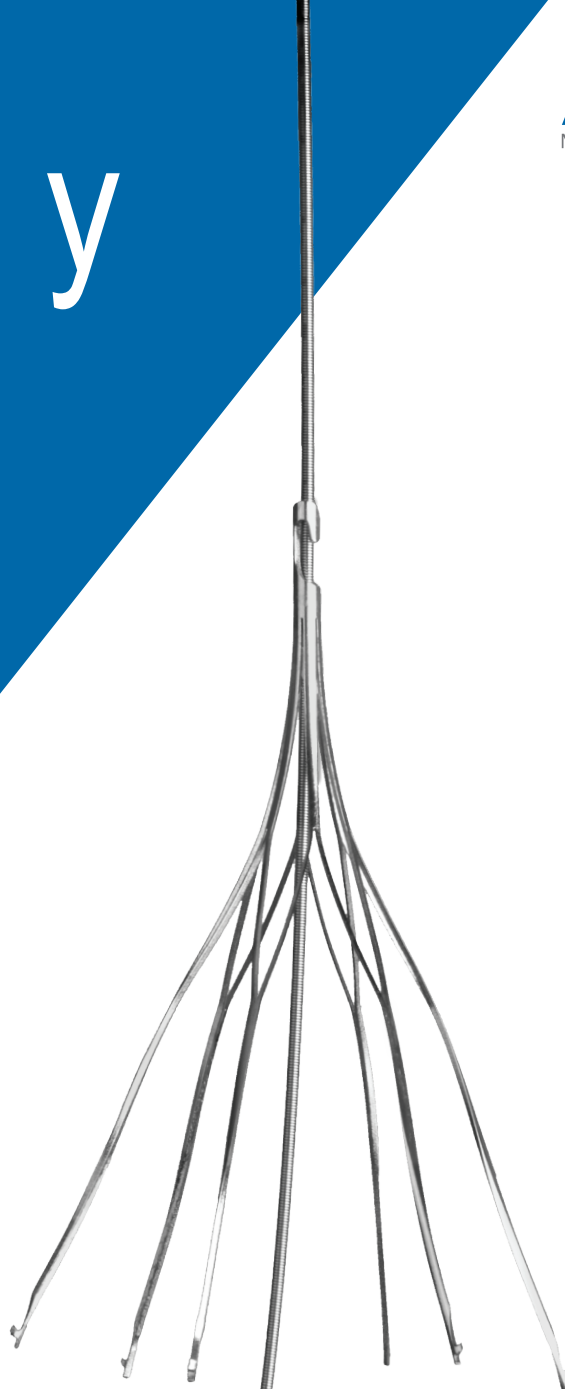

Un Sistema. Muchas Opciones.

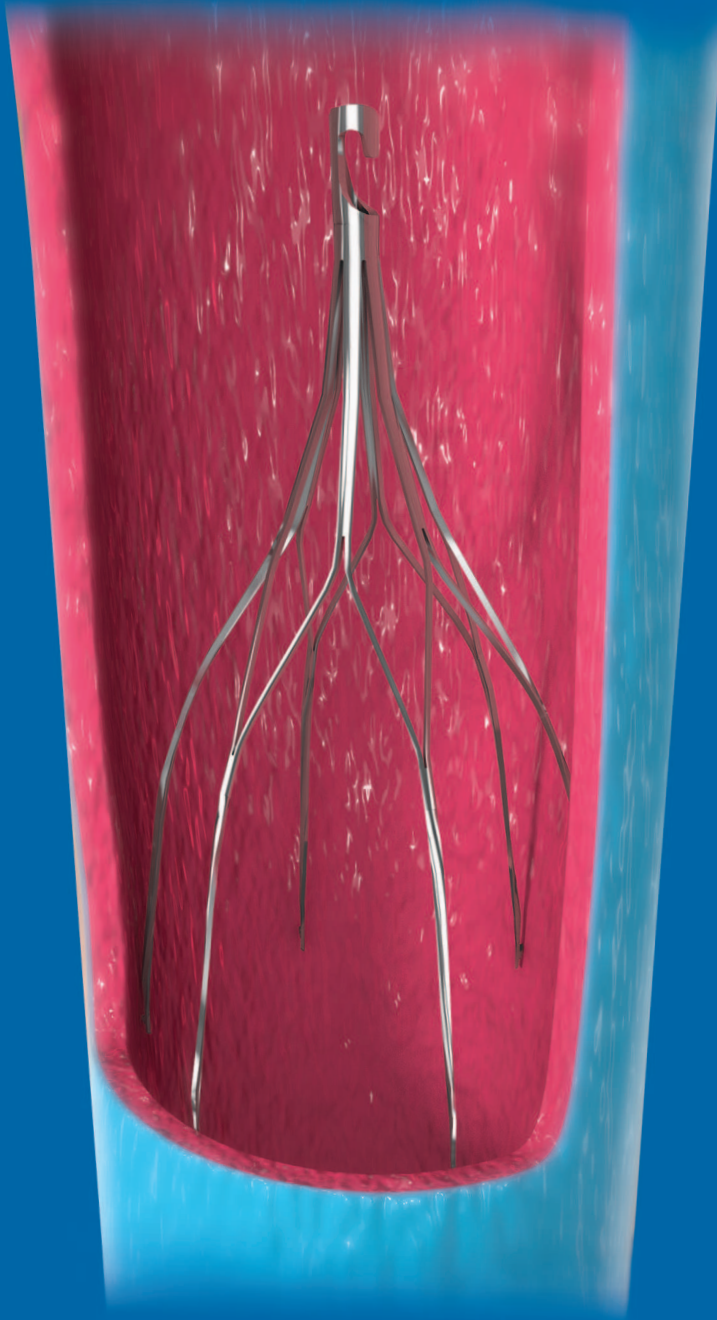

Entrega estándar o por cable

El único filtro IVC cónico recuperable aprobado por la FDA para su administración por vía inalámbrica.

- El diseño exclusivo del filtro permite la entrega a través de un cable $\leq 0,035$ " usando los componentes del kit estándar.
- El cable actúa como guía para desplegar el filtro recto y en el centro de la IVC, colocándolo para una recuperación más fácil.
- La entrega sobre el alambre proporciona estabilidad al ápice durante el despliegue para un posicionamiento preciso y predecible en IVC.

Más acceso para la entrega

El único filtro IVC aprobado por la FDA para su administración mediante acceso yugular, femoral, antecubital y poplíteo.

- Economice tiempo mientras brinda protección PE durante el tratamiento de TVP, al colocar OptionELITE a través del acceso poplíteo para evitar repositonar y volverlo a colocar al paciente.

Para colocación temporal o permanente

- El diseño exclusivo de agarre y ápice facilita la recuperación cuando disminuye la necesidad de protección de PE.
- Un diseño robusto, con un perfil de seguridad positivo establecido, brinda seguridad para la protección de PE en un largo tiempo.

Option™ ELITE

Retrievable Vena Cava Filter

Diseño de ápice sin transición para una fácil captura y retención con un lazo durante la recuperación.

Lumen abierto permite la entrega a través de una guía.

Construcción de nitinol de una sola pieza para una mayor integridad estructural.

Empuñaduras de anclaje para la prevención de la migración caudal

Anclajes curvos para la prevención de la migración cefálica.

Extensiones de patas para prevenir perforaciones.

Resultados iniciales del ensayo clínico (100 Pacientes)
2.0% Migraciones
0.0% Fracturas
1.0% Perforaciones
3.0% Oclusiones





Datos de rendimiento del filtro IVC (165 Pacientes)
0.0% Migraciones
0.0% Fracturas
1.2% Perforaciones
0.6% Oclusiones

Con más de una década de desempeño clínico positivo, consistente y comprobado, el diseño de Option ha logrado un éxito técnico y de recuperación del 100 % con 0 fracturas y 0 migraciones en un estudio de 165 pacientes.²

Componentes

Empujador Curvo

Vaina de Entrega Dilatador

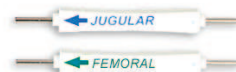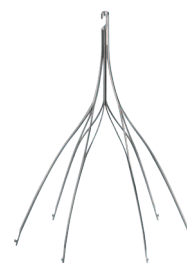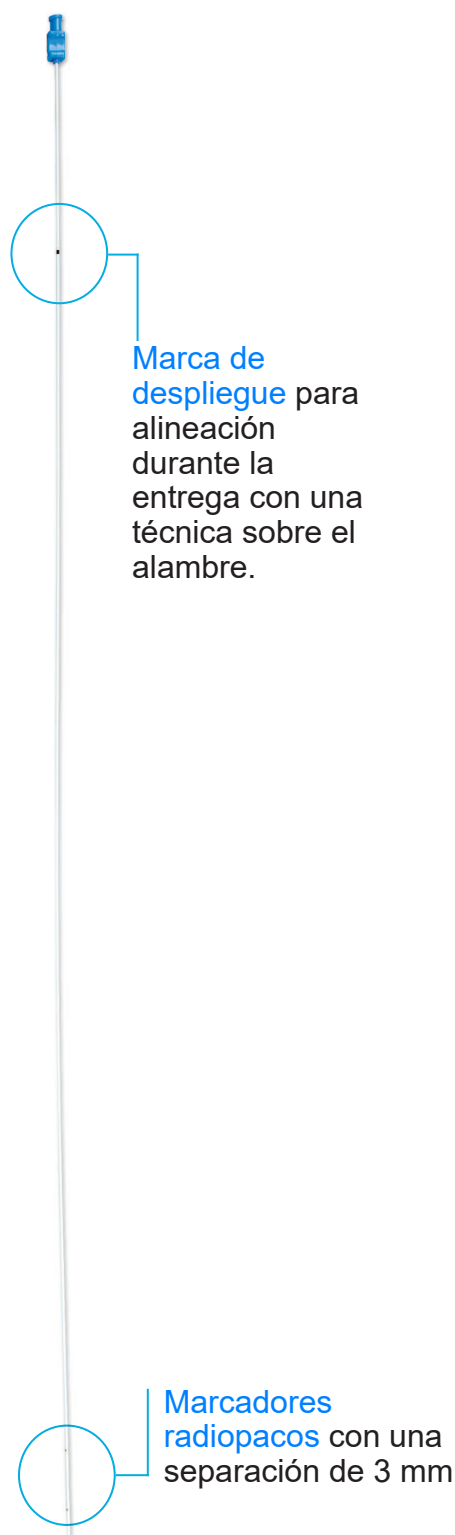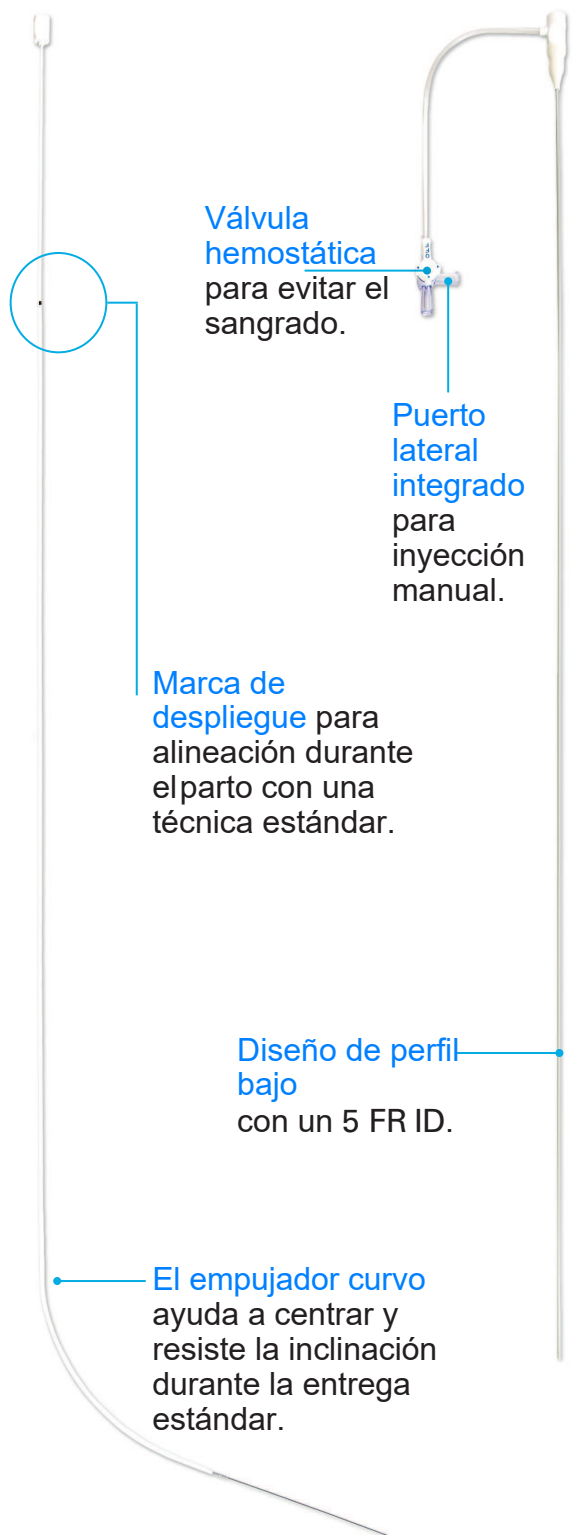

Información para hacer pedidos

OptionELITE Sistema de filtro de vena cava inferior				
Código #	Descripción	Diámetro Cava	Longitud Funda	Tamaño Funda
352506070E	Femoral o Jugular Access	hasta 30 mm	70 cm	5 F
352506100E	Antecubital o Popliteal Access	hasta 30 mm	100 cm	5 F

Registro Sanitario: DM29646E



Calle Las Camelias 735, Of.: 201, San Isidro, Lima-Perú
Tlfs.: (+511) 440-2480/421-9374/441-0661/ (+51)994-044126
ferprosa@ferprosa.com
www.ferprosa.com
ferprosa