



Guía Paso a Paso

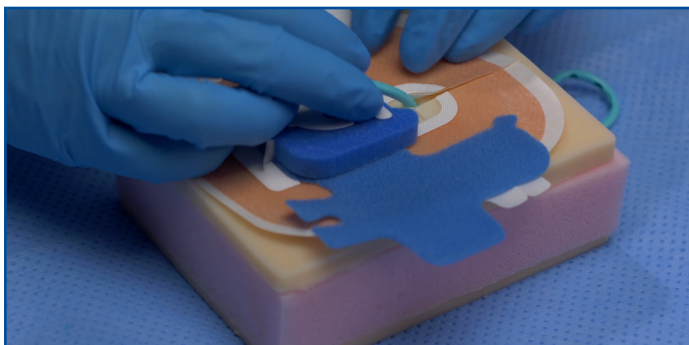


1. Alinee el Skater Fix de modo que el catéter de drenaje esté ubicado dentro del anillo blanco en la parte inferior de la ranura de los dispositivos.

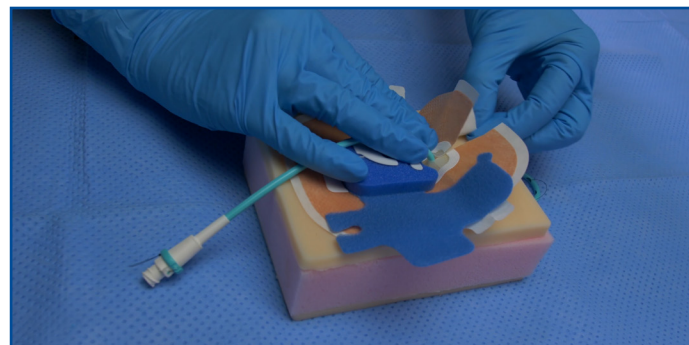


2. Retirar el papel adhesivo de cada sección de una en una comenzando por la parte superior para adherir el dispositivo a la piel.




3. Abra el puente de espuma y retire la cinta blanca para que el adhesivo quede expuesto.

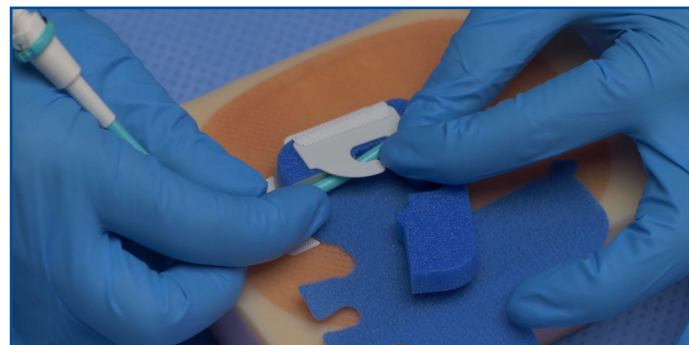

4. Pase el catéter de drenaje por el centro del puente de espuma. Asegúrese de pasar el catéter por debajo del gancho blanco y presiónelo contra el lado de la espuma con adhesivo.

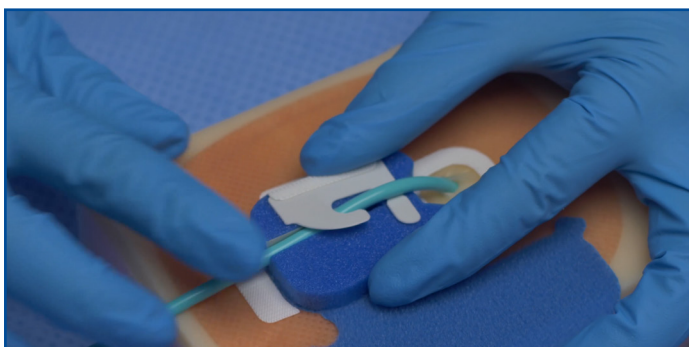


5. Cirre el puente de espuma.

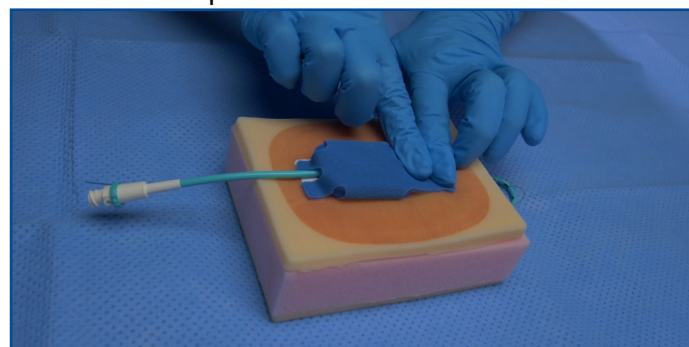

6. Sitúe la cobertura azul sobre el puente de espuma y presione hacia abajo a cada lado del velcro para cerrar el dispositivo.

SKATER™ Fix

Dispositivo de fijación de catéter

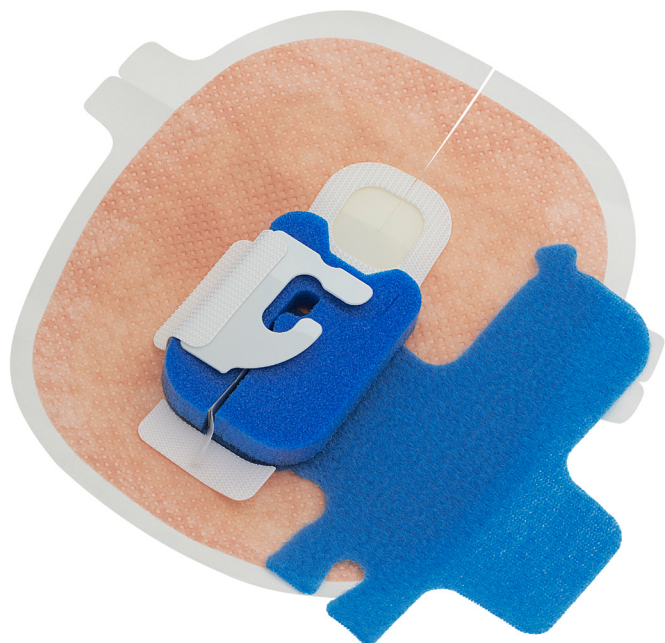

Características clave:

- El puente de espuma evita que el catéter se doble
- El material hidrocoloide absorbe los fluidos del sitio de punción.
- Las espuma de fijación ajustables se adapta a los catéteres de tamaño 5 a 16 Fr.

SKATER dispositivo de fijación de catéter (Caja por 25)

NO. EN CATALOGO	DESCRIPCION
802500001	SKATER™ Fix Catheter Fixation Device

2600 Dallas Parkway
Suite 440
Frisco, TX 75034
Customer Service: 800.927.4669
Fax: 903.677.9396

© 2020 Argon Medical Devices, Inc. All Rights Reserved.
No reproduction of any portion of this work shall be made without prior permission of the author.


ARGON
MEDICAL DEVICES

96-6500-18/0820A